

# Lista kontrolna konserwacji sprzętu\*

## Po każdym pacjencie

- Wyczyszczenie, nasmarowanie i wysterylizowanie końcówek
- Wyczyszczenie (przy użyciu ultradźwięków) i wysterylizowanie końcówek dmuchawek
- Wycieranie i przepłukiwanie przewodu końcówek
- Przepłukiwanie przewodów próżniowych (w przypadku zabiegów chirurgii stomatologicznej)
- Czyszczenie/dezynfekcja powierzchni dotykanych przez pacjenta
- Wymiana wszystkich osłonek barierowych

## Codziennie lub w zależności od potrzeb

- Dodanie tabletki A-dec ICX® przy każdym napełnianiu butelki na wodę†
- Przepłukiwanie spluwaczki przez jedną minutę
- Wyczyszczenie miski spluwaczki i sitka miski
- Przepłukiwanie linii systemu próżniowego

## Co tydzień lub w zależności od potrzeb

- Czyszczenie tapicerki fotela i stołka łagodnym płynem do mycia naczyń i wodą
- Wyczyszczenie zaworów ssaka i ślinociągu
- Sprawdzenie i konserwacja filtra odpadków stałych (dwa razy w tygodniu)
- Konserwacja zbiornika odprowadzania oleju (przeprowadzać co miesiąc, jeśli do konserwacji końcówek stosowane jest urządzenie Assistina)
- Smarowanie uchwytów końcówek
- Czyszczenie pokrywy lampy głównej łagodnym płynem do mycia naczyń i wodą (aby uniknąć zadrapania pokrywy, należy użyć gazy lub miękkiej ściereczki o wymiarach 5 cm x 5 cm (2 cale x 2 cale))
- W razie potrzeby wymiana bariery lampy głównej Medicom® SafeShield™

Data/godzina

---

---

---

---

---

---

---

## Co miesiąc

- Kontrola poziomu CFU w wodzie w systemie i w razie potrzeby odpowiednia obróbka linii wodnych†
- Konserwacja zbiornika odprowadzania oleju (przeprowadzać co tydzień, jeśli do konserwacji końcówek nie jest stosowane urządzenie Assistina)
- Kontrola wszystkich uszczelki pierścieniowych typu O-ring końcówek, silnika i urządzenia Assistina; wymiana zużytych/uszkodzonych
- Nasmarowanie uszczelki pierścieniowych typu O-ring ssaka i ślinociągu
- Nasmarowanie uszczelki pierścieniowych typu O-ring butelki na wodę

Data/godzina

---

---

---

---

---

## Co roku

- Wymiana i nasmarowanie uszczelki pierścieniowych typu O-ring dmuchawki i zaworów z przyciskiem
- Wymiana i nasmarowanie uszczelki pierścieniowych typu O-ring ssaka i ślinociągu
- Wymiana wszystkich uszczelki pierścieniowych typu O-ring końcówek, silnika i urządzenia Assistina
- Wymiana filtrów powietrza i wody w skrzynce przyłączeniowej lub powierzchni przyłączy

Data/godzina

---

---

---

---

